

Smart CheckTM

by ROHO[®]



Operation Manual



Supplier: This manual must be given to the user of this product.

Operator (Individual or Caregiver): Before using this product, read instructions and save for future reference.

s h a p e f i t t i n g t e c h n o l o g y[®]

Smart Check™ by ROHO®

Manual de Operaciones

Proveedor: Este manual se debe entregar al usuario del producto.

Operador (individuo o cuidador): Antes de utilizar este producto, lea las instrucciones y guárdelas para tener como referencia futura.

Contenido

Uso Previsto	16-17
Información Importante de Seguridad	
Leyenda	18
Especificaciones	19
Detalle de las Piezas	20
Descripción General	21
Instrucciones de Smart Setup (Configuración Inteligente)	22-23
Instrucciones de Control	21
Instrucciones de Optional Setup (Configuración Opcional)	25
Guía de Hand Check (Control Manual)	
Instrucciones de Restablecimiento Completo (Hard Reset)	26
Desconexión y Almacenamiento	
Solución de Problemas	
Limpieza y Desinfección	27
Reemplazo de la Batería	
Eliminación	
Política de Devolución	28
Registro del Producto	
Información de Contacto	
Garantía Limitada	



Uso Previsto

Smart Check™ por ROHO® (Smart Check) es un sistema de retroalimentación de cojines que está destinado a ayudar al usuario al guardar el rango de inflado durante la configuración del cojín. Durante los controles posteriores del nivel de inflado, Smart Check está diseñado para indicar si se necesitan ajustes para permanecer en el rango guardado.

Smart Check debe estar conectado a un cojín de un solo compartimento ROHO® Single Compartment Cushion con Sensor Ready™ Technology (Sensor Ready Cushion).



Información Importante de Seguridad

- Lea este manual de instrucciones cuidadosa y completamente antes de utilizar el producto.
- Los productos médicos ROHO están diseñados para ser parte de un régimen de cuidado general. ROHO, Inc. recomienda que un médico realice las recomendaciones de los productos en base a una evaluación de las necesidades médicas y terapéuticas, y el estado general de la persona (por ejemplo, reacciones alérgicas potenciales). El uso de este dispositivo no elimina la inspección de rutina del producto, y todas las actividades normales asociadas con la piel y la protección de los tejidos blandos (cambios de peso, inspección de la piel, cuidado de la piel en general, etc.).

Advertencias

- **Revise la presión de inflado con frecuencia, por lo menos una vez al día, por medio de Smart Check o un control manual.**
- **Si su producto no parece retener el aire, consulte la sección de SOLUCIÓN DE PROBLEMAS del manual provisto con el cojín o comuníquese con Atención al Cliente.**
- **MANTENGA LAS BATERÍAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LAS PERSONAS QUE TIENEN UNA TENDENCIA A COLOCAR OBJETOS NO COMESTIBLES EN SU BOCA.** La ingestión o la inhalación pueden provocar lesiones graves e, incluso, la muerte. Busque asistencia médica de emergencia **INMEDIATAMENTE**.
- **TENGA CUIDADO** cuando esté en presencia de los niños para evitar el peligro de estrangulación. Desconecte el Smart Check cuando no esté en uso y guárdelo en un lugar seguro y accesible.
- El uso de un accesorio (por ejemplo, una bomba o una funda para cojín) distinto al provisto por ROHO, Inc., puede ser peligroso y anular la garantía del producto.
- **NO modifique el Smart Check ni ninguno de sus componentes. Si lo hace, puede provocar daños en el producto y esto anulará la garantía.**

Información Importante de Seguridad, continuación

Advertencias, continuación

- **NO** lo use en presencia de anestésicos inflamables y/o en un ambiente con abundante oxígeno. Si lo hace, incrementará el riesgo de incendio o explosión.
- Si su cojín se siente inestable durante la Smart Setup, realice un restablecimiento completo y repita la Smart Setup. Si todavía se siente inestable, realice una Optional Setup y consulte con un profesional de la salud.
- El cojín **DEBE** ser del tamaño adecuado para el usuario. **SI NO LO ES**, Smart Check no puede encontrar el rango de inflado del individuo durante la Smart Setup, lo cual reduce o elimina los beneficios del cojín, y aumenta el riesgo para la piel y otros tejidos blandos.
- Todos los aspectos del uso del Smart Check descritos en este manual los pueden realizar el individuo o un cuidador. Si no puede realizar las tareas que se describen en este manual, busque ayuda.
- **PELIGRO DE QUEMADURAS:** Si la temperatura ambiente supera los 47 °C (117 °F), **NO** mantenga contacto con la superficie del producto durante más de diez (10) minutos.
- Smart Check **DEBE** utilizarse **ÚNICAMENTE** con una funda de cojín **ROHO** compatible. El uso de una funda diferente puede interferir con la exactitud de las funciones del Smart Check.
- **NO** realice el mantenimiento del Smart Check mientras está en uso. Si lo hace, puede provocar un mal funcionamiento.
- Configure su cojín en las condiciones ambientales habituales. Realice el control cuando las condiciones ambientales, como la temperatura y la altitud, cambien significativamente.

Precauciones


- Diariamente: inspeccione la desconexión rápida, los tubos y la carcasa del dispositivo Smart Check para comprobar el desgaste o las roturas, y para asegurar la sujeción entre los componentes. **NO** siga usando el Smart Check si alguna parte está dañada o no se puede conectar de forma segura. ROHO, Inc. recomienda que Smart Check sea inspeccionado periódicamente por un técnico calificado.
- **NO** sumerja el Smart Check en líquido porque podría dañar el dispositivo.
- Proteja el Smart Check de golpes con objetos contundentes que puedan causar daños y/o roturas.
- **NO** exponga el producto a altas temperaturas, llamas o cenizas calientes.
- **NO** use la válvula de inflado o cualquier componente del Smart Check como manija para llevar o para tirar del cojín.
- La exposición prolongada al ozono puede degradar algunos de los materiales utilizados en la fabricación de este producto, afectar al rendimiento de este producto y anular la garantía del producto.
- La exposición prolongada a la luz de los rayos UV/la luz del sol puede hacer que las etiquetas del producto se desvanezcan.

Leyenda



Advertencia		Límite de temperatura	
Consulte las instrucciones de uso.		Límite de humedad (relativa, sin condensación)	
Ubicación de fabricación		Límite de presión atmosférica	
Mantenga seco.		Peligro de asfixia	
Limpie a mano.		No deseche junto con los residuos domésticos.	
Deje secar al aire.		Identificación del usuario	
No utilice blanqueador.		IEC 60601-1: pieza aplicada tipo BF	
Batería baja: luz ámbar			

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento

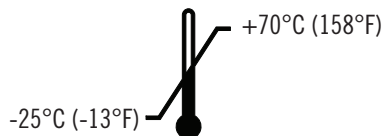

Condiciones de funcionamiento

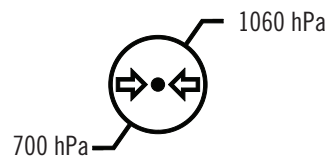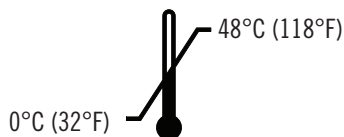

Límite de altitud (sobre el nivel del mar): Inferior a -410 m (-1350 pies) Superior a 3185 m (10.450 pies)


- Smart Check: policarbonato con placa frontal de poliéster
- Estuche de almacenamiento: poliestireno
- Tubos: poliuretano
- Conector: acetal
- Este producto cumple con RoHS2
- Smart Check es una pieza aplicada tipo BF. Smart Check ha sido probada y cumple con las normas IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, y IEC 60601-1-11; certificada para la norma C22.2 N.º 60601-1 de CAN/CSA. Smart Check no causa interferencia electromagnética ni se ve afectada por ella
- Vida útil de servicio esperada: 5 años
- Baterías: Un (1) año de tiempo de funcionamiento habitual
- Smart Check es un dispositivo de clasificación IP54 (protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua)

Detalle de las piezas

Contenido del paquete: Smart Check™ por ROHO®, instrucciones del Smart Check, tarjeta de registro, estuche de almacenamiento.



Para obtener información acerca de su cojín, consulte el *Cojín de compartimiento simple ROHO® con tecnología Sensor Ready™ Manual de Funcionamiento*.

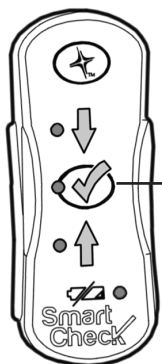

Placa frontal del Smart Check:
Consulte las instrucciones para obtener información detallada de la placa frontal.

Tubos

Desconexión rápida



Manual de operaciones



Tarjeta de registro del producto



Estuche de almacenamiento


Descripción General

Esta página explica cómo utilizar el Smart Check para encontrar, guardar y comprobar la configuración de inflado del cojín.

Lea antes de usar el Smart Check.

Configuración y control inteligentes (Smart Setup/Smart Check):

1. Siga las INSTRUCCIONES DE SMART SETUP (CONFIGURACIÓN INTELIGENTE) Smart Check encontrará y guardará la configuración de inflado de cojín para usted.
2. Siga las INSTRUCCIONES DE CONTROL. Al pulsar el botón Check, el Smart Check le dirá si necesita ajustar su cojín.

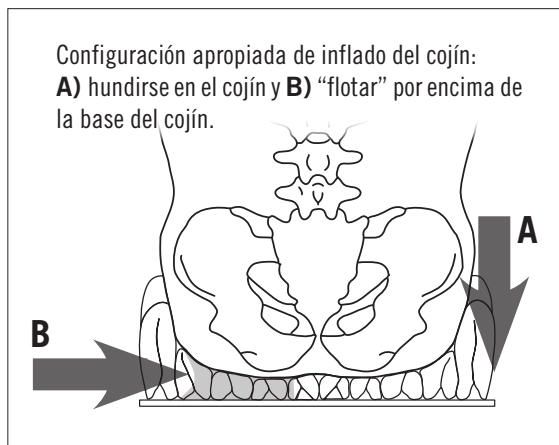

“Optional Setup” es una alternativa de “Smart Setup”.

“Optional Setup” puede ser preferible en las siguientes situaciones:

- Un especialista en sillas calificado ha determinado un nivel de inmersión y envolvimiento alternativo para el individuo.
- El individuo debe adaptarse a las necesidades (como la postura asimétrica severa) que están más allá del entorno de inmersión y envolvimiento encontrado por Smart Check durante la Smart Setup
- El cojín se utiliza en una superficie tapizada (como el asiento de un capitán).

Optional Setup (y control)

1. Encuentre su configuración de inflado de cojín preferida sin usar Smart Check. (Consulte el *Cojín de compartimento simple ROHO® con tecnología Sensor Ready™ Manual de Funcionamiento*).
2. Siga las INSTRUCCIONES DE OPTIONAL SETUP (CONFIGURACIÓN OPCIONAL), con el Smart Check para guardar su configuración de inflado.
3. Siga las INSTRUCCIONES DE CONTROL. Al pulsar el botón Check, el Smart Check le dirá si necesita ajustar su cojín.



No se debe usar Optional Setup si la persona pesa menos de 90 libras (40 kg).




¡IMPORTANTE!



- Realice la configuración (ya sea Smart Setup u Optional Setup) al utilizar el Smart Check por primera vez.
- Realizar nuevamente Smart Setup u Optional Setup si se producen los siguientes cambios: 1) un individuo diferente está utilizando de Smart Check; 2) se está utilizando una silla diferente o un cojín diferente; o 3) el individuo experimenta cambios fisiológicos (por ejemplo, pérdida de peso o aumento de peso). Antes de realizar una nueva configuración, debe borrar la configuración de su Smart Check, consulte las INSTRUCCIONES DE RESTABLECIMIENTO COMPLETO (HARD RESET).
- ¡Realice un control con frecuencia, al menos una vez al día!

Instrucciones de Smart Setup (Configuración Inteligente)

Smart Check encontrará y guardará la configuración de inflado de cojín para usted en su cojín y en su silla. **NOTA:** Los resultados pueden variar según el tipo de cuerpo.

-  - Realice los siguientes pasos en las condiciones ambientales habituales.
- El cojín **DEBE** estar demasiado inflado para iniciar el Smart Setup. Puede sentirse temporalmente inestable; si es así, proceda con precaución.
- El individuo **DEBE** estar sentado en el cojín en la silla antes de usar el Smart Check.

Símbolos y Luces para Smart Setup

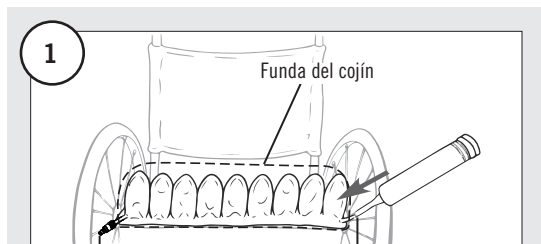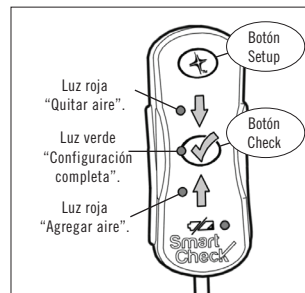


Desconexión rápida



Válvula de inflado

1. Ubique el cojín en la silla. Coloque la boquilla de la bomba sobre la válvula de inflado.


Si se utiliza una funda para cojín, coloque la funda en el cojín antes de inflarlo.

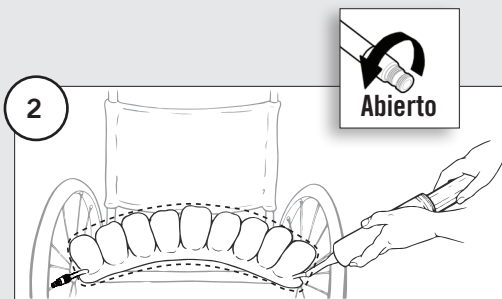

2. Abra la válvula de inflado. Inflar demasiado el cojín hasta que se abulte. Cierre la válvula de inflado. Retire la bomba.

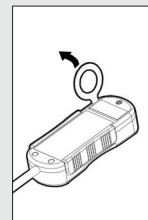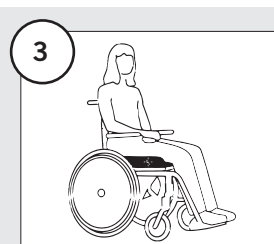


3. Siéntese en la silla en su posición habitual. Tire para quitar el precinto (*solo la primera vez*).

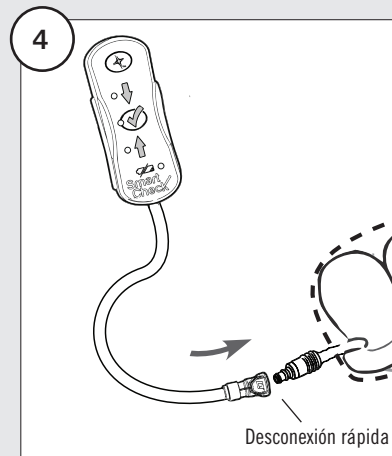

4. Asegúrese de que la válvula de inflado esté cerrada. Fije el Smart Check al cojín. Escuchará un "clic" cuando la conexión sea segura.


Instrucciones de Smart Setup (Configuración Inteligente), continuación

5a.

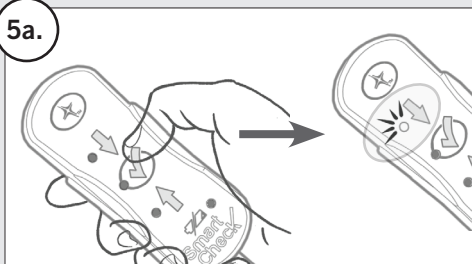


5a. Presione el botón ✓ Check. Cuando vea la luz roja de la flecha hacia abajo ↓, continúe con el paso 5b.

NOTA: Si ve la luz roja de la flecha hacia arriba ↑ cuando pulsa el botón Check: 1) asegúrese de que la desconexión rápida esté bien conectada, y 2) abra la válvula de inflado, agregue más aire, cierre la válvula de inflado y pulse el botón Check ✓ nuevamente. *Repita hasta que vea la luz roja de la flecha hacia abajo.*

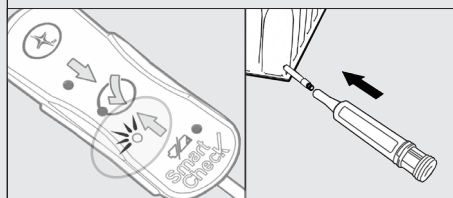


5b.

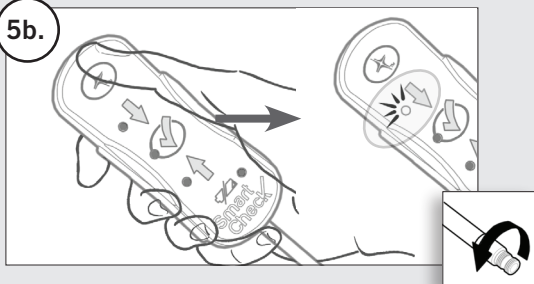

5b. Pulse (pero no sostenga) el botón Setup. Ahora la luz de la flecha hacia abajo ↓ debe **parpadear**. Abra la válvula de inflado, libere aire (aproximadamente 30 a 60 segundos)* y espere a que la luz verde comience a parpadear.

Si la luz roja de la flecha hacia abajo ↓ deja de parpadear antes de que haya abierto la válvula, vuelva al paso 5a.

***Para asegurar una lectura precisa:** Quétese quieto y evite la restricción de flujo de aire mientras que libera aire del cojín

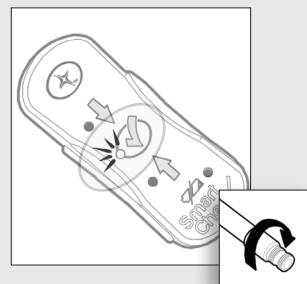

Cuando vea la luz verde intermitente, cierre la válvula de inflado. La luz verde indica que la configuración se ha completado.

Su cojín ya está configurado.

(Siguiente: consulte las **INSTRUCCIONES DE CONTROL**).



Guarde el Smart Check en un lugar seguro y accesible. Consulte las instrucciones de DESCONEXIÓN Y ALMACENAMIENTO.

Instrucciones de Control

Realice un control después de completar el programa de configuración (Smart Setup u Optional Setup).

Cómo realizar un Control:

1. Debe estar sentado en su posición habitual.
2. Presione le botón Check.
3. Consulte la tabla a continuación.



- ¡Realice un control con frecuencia, por lo menos una vez al día!
- Si se utilizó una funda durante la configuración del cojín, se debe usar la misma funda durante el control.
- Realice un control cuando haya un cambio significativo en la altitud.

Símbolos y luces para el Control

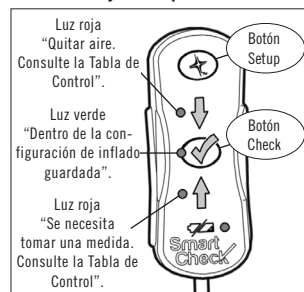


Tabla de Control

NOTA: Después de realizar un control, puede optar por realizar un control manual para familiarizarse con su rango de inflado. Consulte la *GUÍA DE HAND CHECK (CONTROL MANUAL)*.

NOTA: Puede agregar o quitar una pequeña cantidad de aire y aún estar dentro de la configuración de inflado del cojín. El Smart Check guarda su configuración de inflado del cojín con un cierto margen de ajuste.


Luz	Estado	Medida
	El cojín se encuentra dentro de la configuración de inflado guardada.	No es necesaria ninguna medida adicional.
Luz	Causas posibles	Medida
	Su peso puede estar distribuido de manera desigual.	Realice un cambio de peso para hacer circular el aire en el cojín, a continuación, pulse el botón Check para obtener una nueva lectura.
	La desconexión rápida no está correctamente conectada al cojín.	Asegúrese de que la conexión esté segura, a continuación, pulse el botón Check para obtener una nueva lectura. Consulte la <i>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS</i> en este manual.
	El cojín necesita más aire.	Abra la válvula y agregue más aire al cojín (6 a 10 bombeados). Cierre la válvula. Presione el botón Check para obtener una nueva lectura. Repita según sea necesario. Si no puede hacer ajustes por su cuenta, deje de usarlo hasta que esté disponible la ayuda necesaria.
	El cojín o la desconexión rápida en el cojín tienen una fuga lenta.	Consulte la <i>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS</i> en el <i>Cojín de compartimento simple ROHO® con tecnología Sensor Ready™ Manual de Funcionamiento</i> o póngase en contacto con Atención al cliente.
Luz	Causa	Medida
	El cojín tiene demasiado aire.	Abra la válvula y elimine aire del cojín hasta que vea la luz verde. Cierre la válvula. Si no puede realizar esta tarea, busque ayuda.

Instrucciones de Optional Setup (Configuración Opcional)


Optional Setup es una alternativa para Smart Setup. Consulte en Descripción General para obtener más información.

Parte Uno: Ajuste su cojín sin el Smart Check

1. Realice un restablecimiento completo. Consulte las INSTRUCCIONES DE RESTABLECIMIENTO COMPLETO (HARD RESET). **NOTA:** para el uso por primera vez, retire la anilla de la batería.
2. Infle el cojín y colóquelo en la silla. Siéntese en el cojín en su posición habitual. Ajuste el cojín siguiendo las INSTRUCCIONES DE AJUSTE DEL COJÍN en el *Cojín de compartimento simple ROHO® con tecnología Sensor Ready™ Manual de Funcionamiento*.
3. Realice un control manual para confirmar la inmersión y el envolvimiento. (Consulte la GUÍA DE CONTROL MANUAL en este manual.)

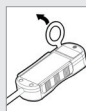


Símbolos y Luces para Optional Setup

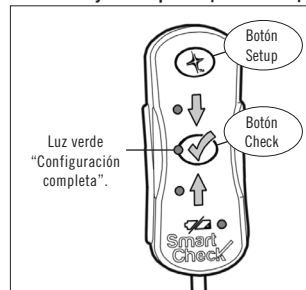



Parte dos: guarde las configuraciones con el Smart Check



Realice los siguientes pasos en las condiciones ambientales habituales.

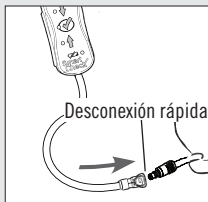

Desconexión rápida

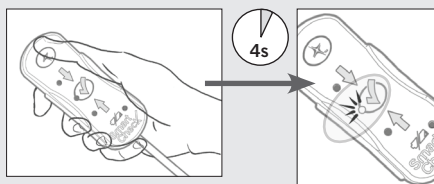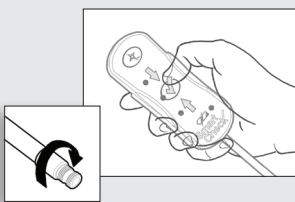

4. Asegúrese de que el Smart Check esté conectado a su cojín. Escuchará un "clic" cuando la conexión sea segura.
5. Asegúrese de que la válvula de inflado esté cerrada. Presione el botón Check ✓ para activar el Smart Check. Verá ya sea una ↑ o una ↓ luz roja. **NO agregue ni quite aire.**
6. Mantenga pulsado el botón Setup durante cuatro (4) segundos hasta que vea una luz verde. La luz verde indica que la configuración se ha completado.




Guarde el Smart Check en un lugar seguro y accesible. Consulte las instrucciones de DESCONEXIÓN Y ALMACENAMIENTO.

Su cojín ya está configurado.
(Siguiente: consulte las INSTRUCCIONES DE CONTROL).

Guía de Hand Check (Control Manual)

Use esta guía para ajustar su cojín durante el Optional Setup. También se recomienda un control manual después de realizar el Smart Setup por lo que tendrá un punto de referencia si necesita ajustar su cojín sin el Smart Check (por ejemplo, si el dispositivo se ha perdido).


1. Coloque su mano entre usted y el cojín. Sienta la prominencia ósea más baja. Debe ser capaz de mover ligeramente la punta de sus dedos. La distancia recomendada entre el individuo y la superficie del asiento es de ½ - 1 pulgada (1,5 cm a 2,5 cm).
2. Si siente como si el cojín tuviese demasiado aire o no tuviese suficiente aire, se necesitan ajustes, consulte las INSTRUCCIONES DE CONTROL y la DESCRIPCIÓN GENERAL.

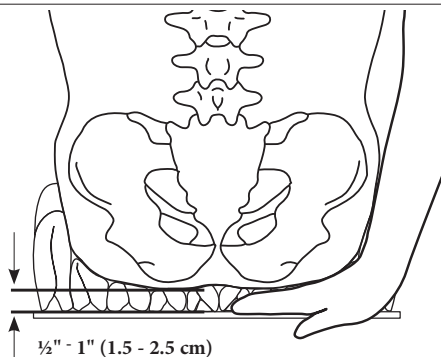

Instrucciones de Restablecimiento Completo (Hard Reset)

Antes de realizar una nueva configuración, debe borrar la configuración en el Smart Check con un restablecimiento completo. **NOTA:** el Smart Check puede estar conectado o desconectado al realizar el Restablecimiento Completo.

1. Asegúrese de que no haya luces fijas o intermitentes.
2. Mantenga simultáneamente presionados el botón Check y el botón Setup durante cinco (5) segundos. Cada una de las luces parpadearán una vez, lo cual indica que la configuración anterior se ha eliminado.

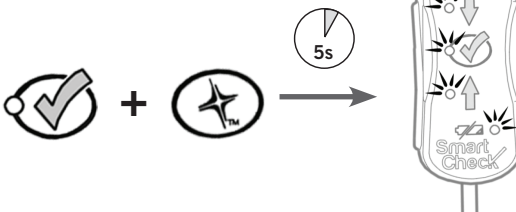

Desconexión y Almacenamiento

Para desconectar el Smart Check del cojín: presione el pestillo gris, luego sepárelo.

Para almacenar el Smart Check: puede separar y almacenar el Smart Check en un lugar seguro y accesible cuando no está en uso (por ejemplo, el estuche de almacenamiento proporcionado con el Smart Check).

 **Confirme que el Smart Check no está presionando su cuerpo.**



Solución de Problemas

Problema	Medida
No hay luces que se vean en el Smart Check después de presionar el botón Check.	Asegúrese de que la anilla se ha retirado del compartimento de la batería. Confirme el tipo de batería y la orientación de la batería. Cambie las baterías si es necesario. Póngase en contacto con Atención al Cliente si el problema continúa.
Configuración Inteligente (Smart Setup): después de presionar el botón Check, el Smart Check sigue mostrando la luz roja ↑ que indica “agregar aire”, pero se ha confirmado que el cojín está demasiado inflado y que la desconexión rápida está bien sujeta.	Inspeccione la junta tórica de desconexión rápida del cojín para ver que no tenga desgaste o daños. Si se encuentra algún daño, póngase en contacto con Atención al Cliente. Inspeccione el cojín para ver si no tiene una fuga lenta. Consulte la SOLUCIÓN DE PROBLEMAS en el <i>Cojín de compartimiento simple ROHO® con tecnología Sensor Ready™ Manual de Funcionamiento</i> .
Configuración Opcional (Optional Setup): No se ve una luz verde al presionar y mantener el botón Setup durante cuatro (4) segundos.	Repita la parte 2 del Manual de Optional Setup. Si aún no ve una luz verde, tenga en cuenta que el programa de Optional Setup puede no ser compatible con sus necesidades o sus preferencias físicas. Consulte la sección DESCRIPCIÓN GENERAL y las INSTRUCCIONES DE SMART SETUP (CONFIGURACIÓN INTELIGENTE), o póngase en contacto con su médico o con Atención al Cliente.
Necesita ayuda con el uso o el mantenimiento del Smart Check, o surgen problemas inesperados.	Póngase en contacto con Atención al Cliente.

Limpieza y Desinfección



- La limpieza y la desinfección son procesos separados. La limpieza debe preceder a la desinfección.
- Cuando es utilizado por el mismo individuo, limpie y desinfecte el producto tan a menudo como sea necesario. Antes de que lo use una persona diferente; limpie, desinfecte y controle que el producto funciona correctamente.



- Siga las normas de seguridad en las etiquetas del producto de limpieza y desinfección.
- Smart Check no se debe limpiar con acetona, MEK, tolueno o removedores de adhesivos.
- NO sumerja el Smart Check en líquido.

Para Limpiar: Limpie el Smart Check con un detergente suave, y un paño limpio y suave o una esponja. Deje secar al aire.



Para Desinfectar: Limpie el Smart Check con un desinfectante sin blanqueador. Deje secar al aire.




Esterilización: Smart Check no se empaqueta en condiciones estériles, ni está diseñado ni requiere ser esterilizado antes de su uso. Las altas temperaturas aceleran el envejecimiento y causan daños al ensamblaje del producto.

Reemplazo de la Batería

La luz de batería baja significa que las baterías deben ser reemplazadas.



- El Smart Check le recordará la configuración guardada después de cambiar la batería.
- Para preservar la vida de la batería, el Smart Check pasa automáticamente al modo "descanso" cuando no está en uso.
- Vida útil que se espera de las baterías: un (1) año.

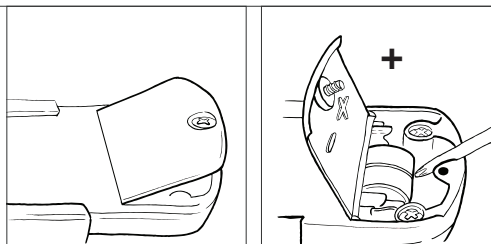

1. Separe el Smart Check del cojín en la desconexión rápida.
2. Utilice un destornillador Phillips con un mango no conductor para aflojar el tornillo y abra la tapa de la batería.
3. Utilice el destornillador para liberar las baterías.
4. Verifique la posición de "+" e inserte dos (2) baterías alcalinas nuevas de 1,5 voltios (LR44, AG13 o equivalente).
5. Cierre la tapa de las baterías.
6. Apriete el tornillo. **NOTA:** si el tornillo no se aprieta completamente, las baterías pueden estar expuestas a la humedad, lo que podría dañar el producto.



MANTENGA LAS BATERÍAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LAS PERSONAS QUE TIENEN UNA TENDENCIA A COLOCAR OBJETOS NO COMESTIBLES EN SU BOCA. La ingestión o la inhalación pueden provocar lesiones graves e, incluso, la muerte. Busque asistencia médica de emergencia INMEDIATAMENTE.



Eliminación

Elimine el producto y/o sus componentes de acuerdo con la normativa aplicable en su jurisdicción, (incluso la correspondiente al desecho de residuos electrónicos). **NO LO QUEME.**



Política de Devolución

Póngase en contacto con ROHO antes de devolver el producto. Los productos devueltos requieren autorización previa de ROHO, Inc., deben ser nuevos y estar sin usar, y están sujetos a un recargo por reposición.

Registro del Producto

Envíe por correo el registro del producto adjunto o registre su producto en www.roho.com.

Información de contacto

En EE. UU.: Teléfono: 800-851-3449 • Fax: 888-551-3449

Servicio de garantía: warranty@roho.com • Atención al cliente: cc@roho.com

Nota: Si se le indica que devuelva algún artículo, envíelo a:
ROHO, Inc., 1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223

Fuera de EE. UU.: intl@roho.com • Teléfono: 618-277-9150 • Fax: 618-277-6518

O visite www.roho.com para obtener una lista de distribuidores de ROHO International.

Garantía Limitada

¿Qué cubre? ROHO, Inc. cubre cualquier defecto en los materiales o en la fabricación del producto.

¿Por cuánto tiempo? A partir de la fecha de compra original, 24 meses.

¿Qué no cubre? Un producto que no ha sido usado correctamente, que ha sido dañado por un accidente o por un fenómeno meteorológico, por ej., inundación, tornado, terremoto, incendio, etc. Todo reemplazo de los accesorios del producto suministrados o modificación al producto invalidará la garantía.

Qué debe hacer el cliente: Dentro de los EE. UU., el cliente debe comunicarse con el Departamento de Servicios de Garantía de ROHO, Inc. Nota: Toda pieza enviada a ROHO, Inc. sin autorización previa no será devuelta al cliente. Fuera de los EE. UU., comuníquese con el distribuidor ROHO de su país.

¿Preguntas? Consulte la INFORMACIÓN DE CONTACTO.

Descargo de responsabilidad. Toda garantía implícita, incluida la GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN A UN USO PARTICULAR, está limitada al mismo período de tiempo que el de los tipos de productos a los que se hace referencia arriba en la sección “Por cuánto tiempo”, y toda acción por un incumplimiento de tales garantías o garantía expresa contenida en el presente debe comenzar dentro de ese tiempo. ROHO, Inc. no será responsable de ningún daño fortuito o resultante en cuanto a pérdidas económicas de propiedad, tanto si son producto de un incumplimiento expreso o implícito de garantías o de otro tipo.

Sus derechos y el efecto de esta garantía en los mismos: Esta garantía restringe la duración de todas las garantías implícitas como se describe arriba y limita o excluye la recuperación por daños incidentales o emergentes. Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones respecto de cuánto tiempo durarán las garantías implícitas; además, algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños emergentes o incidentales, de manera que es posible que esas disposiciones no sean aplicables en su caso. Si bien esta garantía le proporciona derechos legales específicos, usted también puede gozar de otros derechos que varían según la jurisdicción.

ROHO[®]



The Quality Management System of ROHO, Inc. is certified to ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003.

T20185
Revision: 4/1/15
Print Date: Qty: